



CRS MultiCuff

Gebrauchsanweisung

P/N: 1042100407



Inhaltsverzeichnis

Einleitung Sicherheitshinweise	3
Einleitung	3
Sicherheitshinweise	3
Zweckbestimmung	3
Produktbeschreibung Handhabung Serienmäßiger Lieferumfang	4
Produktbeschreibung	4
Handhabung	4
Lieferumfang	5
Zubehör	5
Technische Daten	5
Kombination mit anderen Produkten	5
Lagerung	5
Inbetriebnahme Wartung Funktionsprüfung	6
Inbetriebnahme	6
Wartung	6
Funktionsprüfung	6
Hygienische Aufbereitung	6
Entsorgung	7
Hersteller	7

Einleitung | Sicherheitshinweise

Einleitung

Lieber Kunde,
vielen Dank für den Kauf der MultiCuff. In dieser Gebrauchsanweisung finden Sie technische Informationen sowie Sicherheits- und Gebrauchshinweise.

Wichtig

Vor Nutzung gründlich lesen.
Für späteres Nachschlagen aufbewahren.

Sicherheitshinweise

- Lesen Sie die Gebrauchsanweisung sorgfältig, bevor Sie die MultiCuff in Gebrauch nehmen.
- Bewahren Sie diese Anweisung für Nachschlagezwecke sorgfältig auf und beachten Sie vor allem die Sicherheitshinweise.
- Für Schäden, die durch unsachgemäße Bedienung, Befestigung, Montage, Installation oder Nutzung entstehen, übernimmt der Hersteller keine Haftung.
- Die MultiCuff ist nur entsprechend der Zweckbestimmung zu nutzen.
- Jegliche Veränderungen an der MultiCuff, die nicht vom Hersteller vorgenommen werden, führen zu einem Außerkräfttreten der Gewährleistungs- und Haftungsverpflichtungen der CRS medical GmbH.
- Ausgelaufene Flüssigkeiten, auch Öl bzw. Fett, müssen umgehend entfernt werden, da sie unter Umständen das Material der MultiCuff zerstören oder den Anwender schädigen können.
- Unter Verwendung von medizinischen Geräten sind zwingend deren Sicherheits- und Gebrauchshinweise zu beachten.
- Es ist unbedingt darauf zu achten, dass durch das Anhängen eines Medizingerätes die Funktionsweise und Bedienbarkeit des Gerätes sowie der Patiententrage nicht eingeschränkt sind. Darüber hinaus darf die Bedienung der Patiententrage nicht dazu führen, dass das Medizingerät unbeabsichtigt aus der MultiCuff ausgehängt wird, sodass das Gerät Schaden erleiden könnte.
- Überprüfen Sie die MultiCuff und benutzen Sie sie nicht, wenn:
 - Beschädigungen am Material zu erkennen sind;
 - der Klettverschluss oder der Steckverschluss der Gurte sich nicht vollständig schließen lässt

Zweckbestimmung

Die MultiCuff dient als Befestigungsmöglichkeit von Medizingeräten, zum Beispiel Defibrillatoren, Absaug- oder Beatmungsgeräten. Vorhergesehene Anwendung davon ist im Rettungsdienst oder Krankenhäusern bzw. medizinischen Einrichtungen, da die Geräte hier horizontal an

der Patiententrage oder einer Normschiene befestigt werden können. Die Multicuff ist nicht als Halterung während des Transports in einem Rettungsfahrzeug geeignet. Hier muss das medizinische Gerät in der dafür vorgesehenen Halterung gesichert werden. Eine mögliche Situation, in welcher die MultiCuff zum Einsatz kommt, ist der Transport vom Rettungswagen in die Notaufnahme, sodass keine Geräte mit dem Patienten/der Patientin auf der Patiententrage gelagert werden müssen.

Produktbeschreibung | Handhabung | Serienmäßiger Lieferumfang

Produktbeschreibung



Die MultiCuff besteht aus zwei Manschetten, die jeweils mit Klett verschlossen werden. Den Klettverschluss kann man an Stangen mit verschiedenen großen Durchmessern anbringen. Verbunden sind die Manschetten durch zwei Gurte mit Steckverschluss, die in der Länge variabel sind.

Handhabung

Zur richtigen Befestigung der MultiCuff ist folgendes zu beachten:

1. Eine Manschette wird am Griff des Medizingerätes befestigt, die andere Manschette an einer Stange/einem Bügel. Die schwarze, rutschhemmende Seite der Manschetten zeigt immer nach innen.
2. Die Manschetten werden eng angelegt und dann erst wird der Klettverschluss geschlossen.
3. Zuletzt werden die Steckverschlüsse der beiden Gurte geschlossen. Diese dienen als zusätzliche Sicherung und das Verschließen ist zwingend notwendig. Bei Bedarf kann man noch die Länge der Gurte anpassen.

Lieferumfang

Im Lieferumfang ist folgendes enthalten:

- Multicuff

Zubehör

Es ist kein weiteres Zubehör erhältlich.

Technische Daten

Beschreibung	Daten
Material	Polyestergewebe und LKW-Plane
Maße Manschette in cm (LxB)	16,5x10
Durchmesser Manschette in cm	1,3-3,7
Filzband Länge in cm	5,5
Hakenband Länge in cm	3,5
Schließzyklen des Klett	3000
Gurt Länge in cm	26
Maximale Traglast in kg	20

Im Zuge von Produktverbesserungen behalten wir uns technische und optische Veränderungen an den Artikeln vor.

Kombination mit anderen Produkten

Dieses Produkt ist dafür vorgesehen, mit anderen Produkten verwendet zu werden. Hier muss jedoch die maximale Traglast der MultiCuff beachtet werden, welche im Kapitel „Technische Daten“ ersichtlich ist. Zusätzlich muss individuell geprüft werden, ob die Manschetten die Griffe der Medizingeräte vollständig umschließen und beim Befestigen an einer Schiene/Stange sicher halten. Die Klett- und Steckverschlüsse müssen geschlossen werden.

Lagerung

Das Produkt muss im geschlossenen Raum gelagert werden, sodass es vor Witterung geschützt ist. Darüber hinaus ist das Produkt nur in sauberem und trockenem Zustand zu lagern, beachten Sie hierzu das Kapitel „Hygienische Aufbereitung“.

Inbetriebnahme | Wartung | Funktionsprüfung

Inbetriebnahme

Die MultiCuff ist mit der Auslieferung direkt einsatzbereit.

Wartung

Nach jeder Nutzung ist die MultiCuff auf mögliche Beschädigungen oder Verschmutzungen zu prüfen. Alle Verschlüsse und Gurte müssen entsprechend dem Unterkapitel „Funktionsprüfung“ getestet werden, für das restliche Material sowie die Nähte reicht eine Sichtprüfung.

Zwecks Reinigung ist das Unterkapitel „Hygienische Aufbereitung“ zu beachten.

Funktionsprüfung

Nach jeder Nutzung ist eine Funktionsprüfung durchzuführen (bei Nichtgebrauch mindestens alle sechs Monate). Falls ein Fehler festgestellt wird, darf die MultiCuff nicht verwendet werden. In diesem Fall muss der Hersteller unverzüglich informiert werden.

Folgende Schritte sind bei einer Funktionsprüfung durchzuführen:

1. Überprüfen Sie, dass beide Gurte einen festen Sitz an den Manschetten haben.
2. Überprüfen Sie, dass die Steckverschlüsse der Gurte einwandfrei schließen.
3. Überprüfen Sie, dass die Klettverschlüsse beider Manschetten richtig verschließen.

Hygienische Aufbereitung

Die MultiCuff muss nach Bedarf, abhängig von Gebrauch und Verschmutzung, vollständig gereinigt werden.

Für die Reinigung empfehlen wir ein feuchtes Tuch mit Wasser und bei Bedarf unter Verwendung eines handelsüblichen milden Reinigungsmittels.

Zur Desinfektion kann ebenfalls ein handelsübliches Desinfektionsmittel genutzt werden. Dieses sollte vor erstmaligem Gebrauch an einer wenig sichtbaren Stelle getestet werden.

Rückstände von Reinigungs- und Desinfektionsmittel müssen gründlich mit klarem kaltem oder warmem Wasser abgespült werden. Anschließend sind feuchte Flächen mit einem Tuch zu trocknen.

Grundsätzlich sind keine Reinigungsmittel zu verwenden, die Lösungsmittel enthalten oder stark alkalisch sind. Diese Empfehlungen entsprechen unserem besten Wissen. Sie entbinden den Anwender nicht von einer Testung des Materials. Von allen verwendeten Reinigungsmitteln sind die Herstellerempfehlungen zu beachten.

Entsorgung

Verpackungen sind Rohstoffe und daher wiederverwertbar. Entsorgen Sie diese im Interesse des Umweltschutzes sortenrein. Weitere Informationen zur umweltfreundlichen Entsorgung erhalten Sie von CRS medical.

Gerne können Sie sich mit dem Hersteller in Verbindung setzen zwecks Rücksendung, dieser kümmert sich dann um die Entsorgung der MultiCuff.

Hersteller

CRS medical GmbH
Loherstraße 6
D - 35614 Asslar

T: +49 6441 38331-0
F: +49 6441 38331-29
info@crs-medical.com
www.crs-medical.com



Loherstraße 6
D-35614 Aßlar

T: +49 6441 38331-0
F: +49 6441 38331-29

info@crs-medical.com
www.crs-medical.com