



**Gebrauchsanweisung | User Manual**  
**Bracket M2 w/o power**  
**P/N: 1042100050**



## ■ INHALTSVERZEICHNIS | TABLE OF CONTENTS

EINLEITUNG   SICHERHEITSHINWEISE .....	1
VERWENDUNGSZWECK .....	2
LIEFERUMFANG .....	2
TECHNISCHE DATEN .....	3
ZUBEHÖR .....	3
MONTAGE   INSTALLATION .....	4
BEDIENUNG .....	5
REINIGUNG   DESINFEKTION .....	6
VERWENDETE SYMBOLE .....	7
ENTSORGUNG .....	7
SERVICE   HERSTELLER .....	7
WELCOME   SAFETY INSTRUCTIONS .....	8
APPLICATION .....	9
SCOPE OF DELIVERY .....	9
TECHNICAL DATA .....	10
ACCESSORIES .....	10
INSTALLATION .....	11
OPERATION .....	12
CLEANING   DISINFECTION .....	13
SYMBOLS .....	13
DISPOSAL .....	14
SERVICE   MANUFACTURER .....	14



## ■ EINLEITUNG | SICHERHEITSHINWEISE

Lieber Kunde,

vielen Dank für den Kauf des Bracket M2 w/o power.

In dieser Anweisung finden Sie technische Informationen, Gebrauchs- und Montagehinweise.

### Sicherheitshinweise

- Lesen Sie die Gebrauchsanweisung sorgfältig durch, bevor Sie das Bracket M2 w/o power in Betrieb nehmen.
- Bewahren Sie diese Anweisung für Nachschlagezwecke sorgfältig auf und beachten Sie vor allem die Sicherheitshinweise.
- Für Schäden, die durch unsachgemäße Bedienung, Befestigung, Montage oder Installation entstehen, übernimmt der Hersteller keine Haftung.
- Instandsetzung und Wartung am Bracket M2 w/o power dürfen nur von autorisiertem Fachpersonal durchgeführt werden. Bitte wenden Sie sich bei einem Defekt direkt an den technischen Kundendienst der CRS medical GmbH. Jegliche Veränderungen an der Vorrichtung oder ihrem Zubehör, die nicht vom Hersteller vorgenommen werden, führen zu einem Außerkrafttreten der Gewährleistungs- und Haftungsverpflichtungen der CRS medical GmbH.
- Überprüfen Sie das Bracket M2 w/o power und benutzen Sie es nicht wenn:
  - mechanische Beschädigungen am Schließmechanismus zu erkennen sind
  - mechanische Beschädigungen an der Geräteaufnahme zu erkennen sind

## ■ VERWENDUNGSZWECK

Die Wandhalterung Bracket M2 w/o power ist nur für die sichere Halterung eines ZOLL M2™ in Verbindung mit der original ZOLL M2™ Zubehörtasche bestimmt. Die Verwendung einer anderen Schutztasche für dieses Gerät ist nicht zugelassen.

Die Halterung darf nur in räumlich geschützten Umgebungen verwendet werden. Dazu gehören massive Wände im Innenraum von Gebäuden und stabile Wände von EMS-Bodenfahrzeugen.

Bitte beachten Sie zusätzlich die Gebrauchsanweisung des Defibrillators.

## ■ LIEFERUMFANG

1 Bracket M2 w/o power (P/N: 1042100050)

1 Gebrauchsanweisung

## ■ TECHNISCHE DATEN

<b>Gewicht</b>	3950 g
<b>Maße (HxBxT)</b>	362x277x231 mm
<b>Betriebstemperatur</b>	0°C bis +40°C, 5% bis 95% HR, nicht kondensierend
<b>Lagertemperatur</b>	-30°C bis +70°C, 5% bis 95% HR, nicht kondensierend

*Im Zuge von Produktverbesserungen behalten wir uns technische und optische Veränderungen am Artikel vor.*

## ■ ZUBEHÖR

Es ist kein weiteres Zubehör erhältlich.






## ■ BEDIENUNG

### Öffnen

Entriegeln Sie das Bracket M2 w/o power indem Sie den roten Bügelgriff nach vorne ziehen (1) und anschließend nach oben bewegen (2).

Die Verriegelung rastet in der oberen Position ein (3) und das Gerät kann entnommen werden.

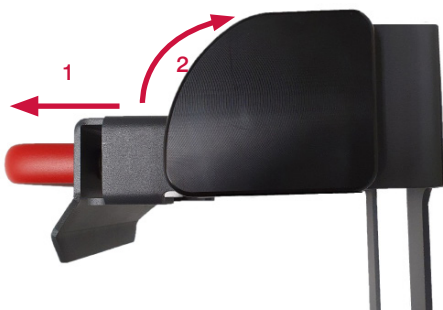

## Schließen

Achten Sie darauf, dass der ZOLL M2™ mit der zugehörigen Zubehörtasche ordnungsgemäß in der Unterschale des Bracket M2 w/o power sitzt.

Zum Schließen ist keine Entriegelung notwendig. Greifen Sie den roten Bügelgriff und drücken Sie den Deckel nach unten. Am Sichersten verriegelt das Bracket M2 w/o power, wenn Sie den Deckel nach Überwindung des Widerstands loslassen und von selbst in Endposition rutschen lassen.

## ■ REINIGUNG | DESINFEKTION

Bitte entnehmen Sie den ZOLL M2™ zur Reinigung aus der Halterung.

Das Bracket M2 w/o power kann mit einem feuchten, fusselfreien Tuch und handelsüblichen, milden Kunststoffreinigern gereinigt werden. Bitte vergewissern Sie sich vor dem Gebrauch, dass das Reinigungsmittel keine Lösemittel enthält.

Verwenden Sie zum Desinfizieren ebenfalls handelsübliches Desinfektionsmittel.

## ■ VERWENDETE SYMBOLE



Siehe Gebrauchsanweisung / Sicherheitshinweise beachten



Referenznummer



Chargennummer



Hersteller

## ■ ENTSORGUNG

Verpackungen sind Rohstoffe und daher wiederverwertbar. Entsorgen Sie diese im Interesse des Umweltschutzes sortenrein.

Weitere Informationen zur umweltfreundlichen Entsorgung erhalten Sie vom Hersteller.

## ■ SERVICE | HERSTELLER

CRS medical GmbH  
Loherstraße 6  
D - 35614 Asslar

T: +49 6441 38331-0  
F: +49 6441 38331-29  
info@crs-medical.com  
www.crs-medical.com

## ■ WELCOME | SAFETY INSTRUCTIONS

### Welcome

Thank you for purchasing the Bracket M2 w/o power.

In this user manual you will find technical information, instructions for use, and mounting directions.

### Safety Instructions

- Read and understand the instructions before installing or operating the Bracket M2 w/o power.
- Follow all safety instructions and save this user manual in a safe place for future use.
- The manufacturer accepts no liability for damage caused by improper operation, mounting, or assembly.
- Repair and maintenance of the Bracket M2 w/o power can only be performed by authorized personnel. Please consult directly to CRS medical GmbH Technical Support if the device is defective or damaged. Any changes to the device or its accessories which are not performed by CRS medical GmbH will void all product warranties. CRS medical GmbH will not be liable for unauthorized repair or maintenance.
- Check the Bracket M2 w/o power and do not use if:
  - there is visible mechanical damage on the locking mechanism
  - there is visible mechanical damage on the holder

## ■ APPLICATION

The Bracket M2 w/o power is intended to be installed in ambulances which use the ZOLL M2™ defibrillator in combination with the original ZOLL M2™ softbag. Using a different protective bag is not allowed.

The holder may only be used in a protected environment. These include massive walls in the interior of buildings and stable walls of EMS ground vehicles.

Please also follow all manufacturer's instructions for the defibrillator.

## ■ SCOPE OF DELIVERY

1 Bracket M2 w/o power (P/N: 1042100050)

1 User Manual

## ■ TECHNICAL DATA

<b>Weight</b>	3950 g
<b>Dimensions (HxWxD)</b>	362x277x231 mm
<b>Operating temperature</b>	0°C to +40°C, 5% to 95% Humidity, non-condensing
<b>Storage temperature</b>	-30°C to +70°C, 5% to 95% HR, non-condensing


*In the pursuit of product improvement, we reserve the right to make visual and/or technical changes to the product.*

## ■ ACCESSORIES

There are no additional accessories available.

## ■ INSTALLATION

Install the Bracket M2 w/o power with 8 screws size M6 according to the drilling diagram below.

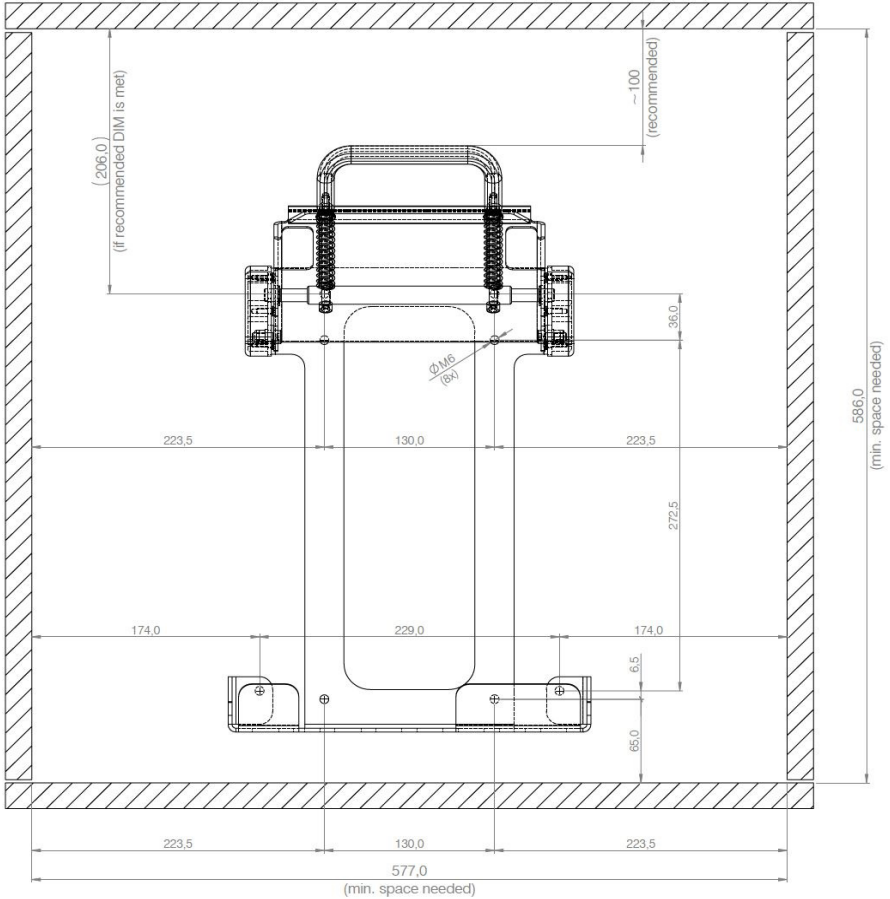


(All measurements are in mm)

## ■ OPERATION

### Opening

Unlock the Bracket M2 w/o power by pulling the red handle forward (1) and then move it upwards (2).

The locking device rests in the upper position (3) so the device can be removed.

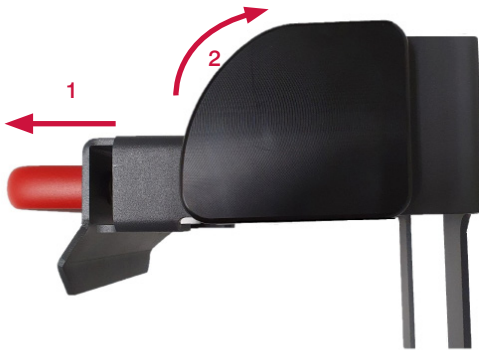



## Closing

Make sure that the ZOLL M2™ with its associated softbag is properly placed and seated in the bottom cradle of the Bracket M2 w/o power.

To close the Bracket M2 w/o power there is no unlocking, simply grab the red handle and pull the cover down. The safest way to lock the M2 bracket w/o power is to release the lid after overcoming the resistance and let it slide into the end position by itself. An audible click should be heard.

## ■ CLEANING | DISINFECTION

Please remove the ZOLL M2™ out of the bracket before cleaning.

The Bracket M2 w/o power can be cleaned with a damp, lint-free cloth and commercially available mild plastic cleaners. Please ensure that the cleanser does not contain any solvents.

Commercially available disinfectants can be used for disinfection.

## ■ SYMBOLS



See user manual / note safety instructions



Reference



Lot number



Manufacturer

## ■ DISPOSAL

Packing is raw material and therefore recyclable. On behalf of environment protection please dispose the packing sorted. Dispose and recycle all packaging according to your local laws and regulations.

For more detailed information on nonpolluting disposal please contact service.

## ■ SERVICE | MANUFACTURER

CRS medical GmbH  
Loherstraße 6  
D - 35614 Asslar

T: +49 6441 38331-0  
F: +49 6441 38331-29  
[info@crs-medical.com](mailto:info@crs-medical.com)  
[www.crs-medical.com](http://www.crs-medical.com)



□ Loherstraße 6  
□ D - 35614 Asslar

□ T: +49 6441 38331-0  
□ F: +49 6441 38331-29

□ [info@crs-medical.com](mailto:info@crs-medical.com)  
□ [www.crs-medical.com](http://www.crs-medical.com)

